

ODBĚR NA NOVÝ TYP KORONAVIRU SARS CoV-2

Doporučený typ vzorku: nazofaryngeální výtěr

- manipulace s odběrovou soupravou musí být prováděna za sterilních podmínek
- odběrovou soupravu tvoří buď 1 nebo 2 tampony a **buď zkumavka s univerzálním (UTM), nebo virologickým médiem (virologické uchovávat zamražené!)**
- v případě jednoho tamponu provádíme odběr z nosohltanu přes nos, v případě dvou tamponů provádíme druhý odběr z patrových oblouků
- oba odběry zalamujeme do jedné zkumavky s médiem – nelze-li zalomit, ustrihněte
- maximální výtěžnost má odběr v akutní fázi infekce, tj. v prvních třech až čtyřech dnech od rozvoje klinických příznaků onemocnění
- odběr provádíme nejlépe po ránu nalačno, bez předchozího používání kloktadel
- v případě, že nemáme optimální tampon pro odběr z nasofaryngu, pak nejdříve odebíráme nosohltan přes ústa (nutné vyhnout se mandlím!) a druhý odběr provedeme z nosu a znovu oba odběry zalomíme do jedné zkumavky
- v žádance je nutné uvést jméno, rodné číslo pacienta, kód pojišťovny, symptomy, terapii, jméno /odbornost/ IČZ odesílajícího lékaře, bydliště pacienta včetně PSČ, kontaktní telefon jak na pacienta, tak pro hlášení výsledku
- výtěr v odběrovém médiu ihned uložíme do chladničky nebo chlazeného boxu a co nejrychleji transportujeme do laboratoře (optimálně do 24 hodin od odběru)
- materiál je transportován v bezpečnostním trojbalu, označen UN3373, žádanka je oddělena od infekčního materiálu nepropustnou bariérou
- virologické médium je v mikrobiologických laboratořích sterilně rozplňováno do dostupných sterilních polypropylenových zkumavek (nejčastěji do močových) – 1,5 ml
- v sáčku je vždy informace o uskladnění média – virologické nutno mrazit
- k médiu je přikládán 1 nebo 2 tampony (podle dostupnosti v laboratoři)
- klíčový je výtěr z nazofaryngu

